

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗОЙ «ЦИТРИН»

1 Перед применением внимательно изучите маркировку: проверьте информацию на упаковке и этикетках, модель линзы, величину диоптрии и дату срока годности. Проверьте упаковку, удостоверьтесь, что она не повреждена и имеет правильную форму.



2 После открытия внешней полиэтиленовой оболочки и картонной упаковки сверьте информацию о линзе (модель, величину диоптрии и серийный номер) на пакете и контейнере с информацией на этикетке внешней упаковки.



3 После открытия внешней полиэтиленовой оболочки и картонной упаковки сверьте информацию о линзе (модель, величину диоптрии и серийный номер) на пакете и контейнере с информацией на этикетке внешней упаковки.



4 Аккуратно вращая по направлению стрелки, откройте контейнер.



5 Осторожно возьмите линзу пинцетом за гаптическую часть и достаньте ее из контейнера. Вынимая линзу из контейнера, не касайтесь оптической поверхности ИОЛ пинцетом до момента сгибания линзы.




6 Промойте ИОЛ при помощи стерильного сбалансированного ирригационного раствора до имплантации. Весь рабочий инструментарий должен быть тщательно очищен, чтобы исключить появление следов на линзе в процессе складывания.



7 Перед имплантацией осмотрите линзу под увеличением. В случае подозрения на дефект или деформацию, такую линзу следует вернуть изготовителю вместе с упаковкой.

Во время манипуляций не следует допускать контакта ИОЛ с другими материалами, поверхностями (салфетки, марли, перчатки, пеленки, стол с инструментами и пр.).


8 В капсульном мешке задняя асферическая оптическая поверхность линзы с острым углом должна прилежаться к задней капсуле хрусталика. Для этого, при имплантации, линзу следует ориентировать следующим образом: гаптический элемент, обращенный во время имплантации ИОЛ к носу пациента – должен быть открыт влево, а гаптический элемент, обращенный ко лбу пациента – вправо.

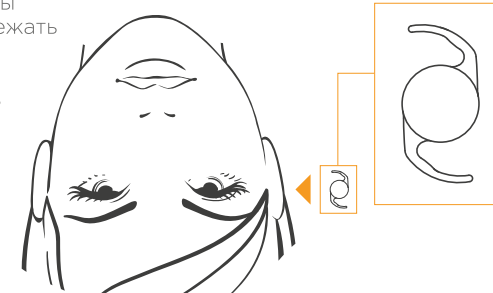


! Следует избегать длительного нахождения ИОЛ на открытом воздухе. После складывания линзы необходимо ее имплантировать не позднее, чем через 3 минуты.

Техника имплантации может быть различной, поэтому хирургу рекомендуется использовать изученный метод, который является, по его мнению, наиболее подходящим.

УКЛАДКА В КАРТРИДЖ

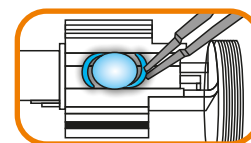

ПРАВИЛЬНО

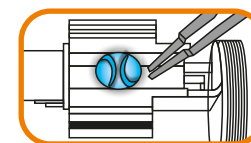

НЕ ПРАВИЛЬНО



ООО «НаноОптика»
117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корпус 1, эт. 18
+7(495) 107-99-71
info@nanoptika.ru

www.nanoptika.ru



НАНООПТИКА

NANOVISION GROUP